


### A - MARCAJES / PERFORACIONES LADO TALONES


La guía Minima Dobles varillas está concebida para posicionar los agujeros temporales de las lentes, en algunos segundos.

PUENTE : ver Minima-Zero (mismo puente).

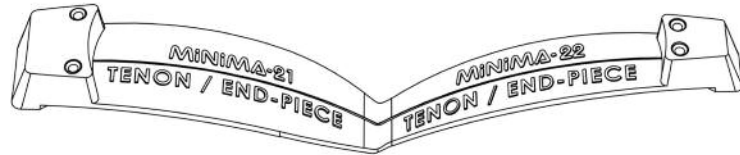

#### MARCAJES

Localizar la posición de los agujeros con la ayuda de la hoja de formas. Según la montura, dirigirse a las indicaciones específicas de las hojas de formas.

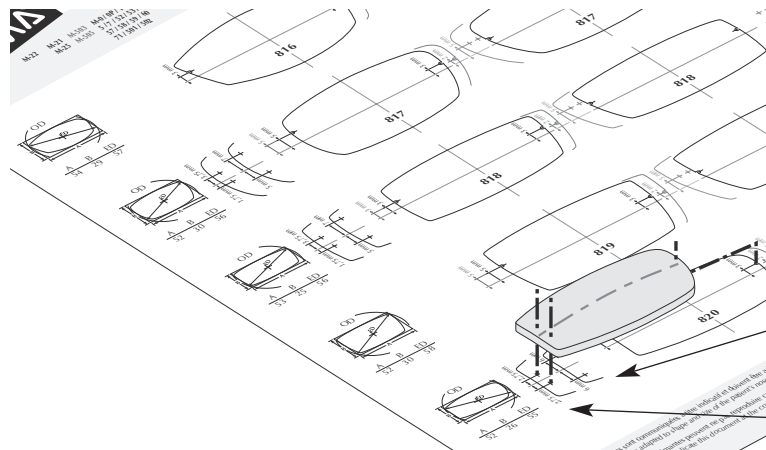



Minima-21  
Minima-25  
Entre-eje : 12 mm

Minima-22  
Entre-eje : 5,5 mm

#### PERFORACIONES


La perforación se hace utilizando la guía Minima Dobles varillas.

(N) = Lado puente

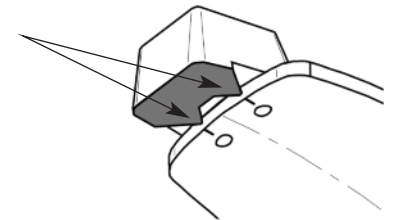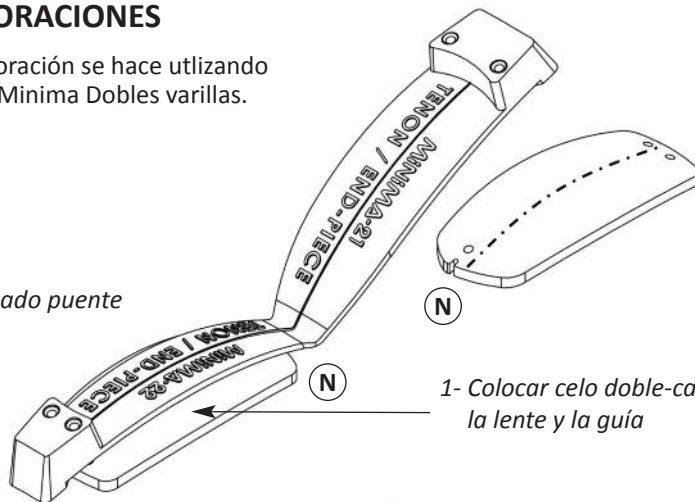


2- Colocar la guía paralela al eje de la lente colocando los dos salientes sobre su localización y contra el borde de la lente

3- Perforar la lente derecha con la ayuda de una broca  $\varnothing$  1,7 mm

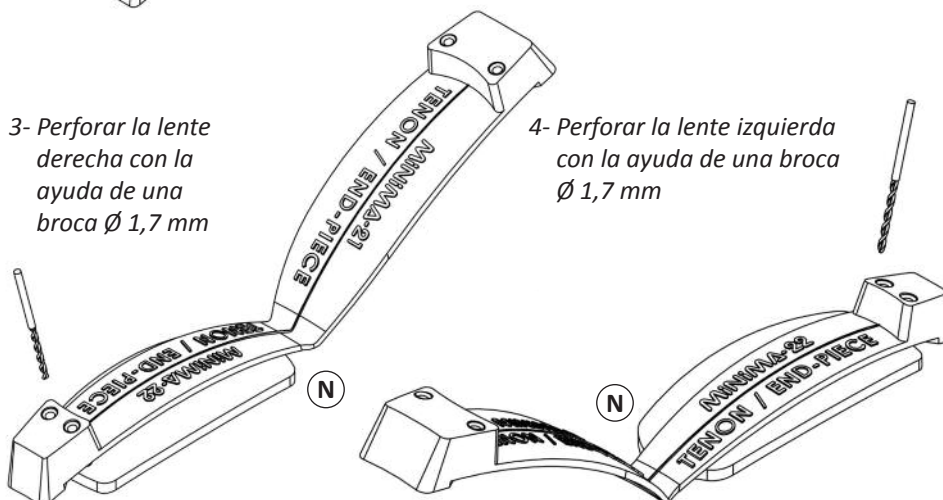

4- Perforar la lente izquierda con la ayuda de una broca  $\varnothing$  1,7 mm

5- Acabado : desbarbar por cada lado, los agujeros

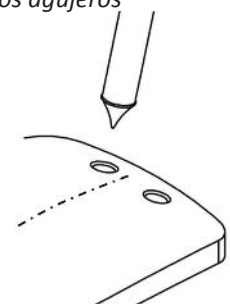

### B - MONTAJE

**Las varillas se entregan con sus 2 poliamidas pre-montadas.**




**Nota : las poliamidas no deben exponerse a una fuente de calor ni deben utilizarse después de un primer montaje.**

#### MONTAJE DEL PUENTE

Insertar la poliamida en el agujero de la lente, lado cóncavo, después cortar.

Para insertar el puente, ayúdense de la pinza Minima-Zero entregada.

Montaje del puente adaptable.

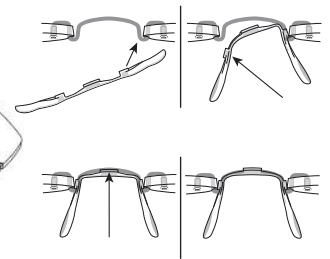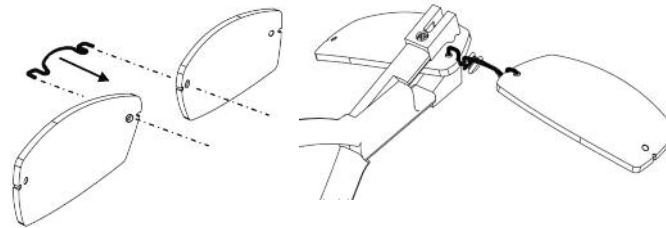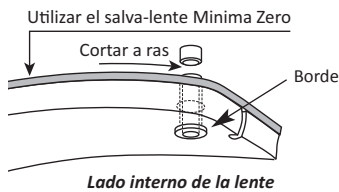



Mantener el borde de la poliamida contra la cara cóncava de la lente.

#### MONTAGE DES BRANCHES

1- Para las monturas Minima 21-22-25, insertar las 2 varillas provistas de sus poliamidas


#### PARTICULARIDADES :

1- Para las monturas Minima 23-24, insertar las 2 varillas (provistas de sus poliamidas) hasta su cruce

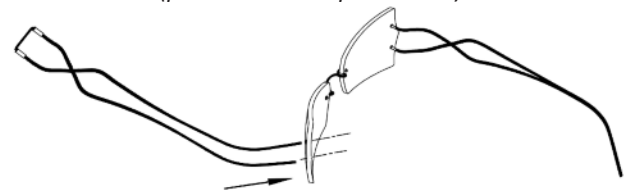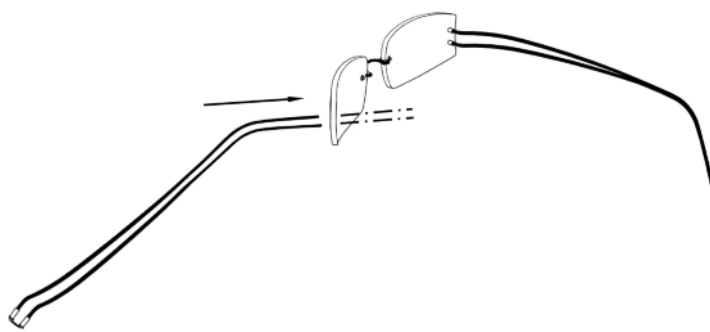

2- Insertar los terminales  
La marca "MINIMA" siempre debe situarse en el lado externo del terminal

2- Realizar una rotación de 180° de las 2 varillas

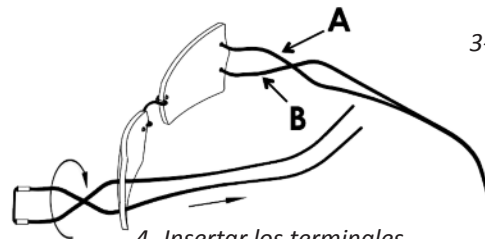


3- Insertar la varilla hasta las poliamidas y colocar la varilla A por debajo de la B


4- Insertar los terminales

### FUNDAS OPCIONALES PARA MINIMA-22G

#### ENFUNDADO DE VARILLAS

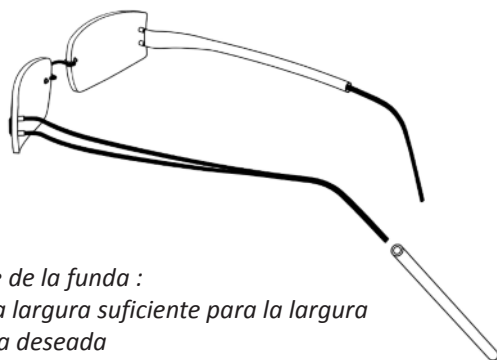

1- Montaje de la funda :  
Prever la largura suficiente para la largura de varilla deseada  
Insertar la funda hasta las poliamidas

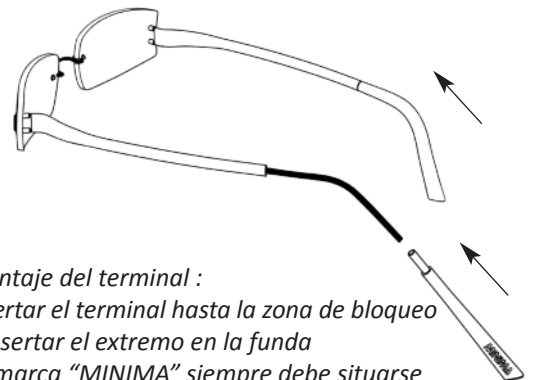

2- Montaje del terminal :  
Insertar el terminal hasta la zona de bloqueo e insertar el extremo en la funda  
La marca "MINIMA" siempre debe situarse en el lado exterior de los terminales

### C - AJUSTE

Con el fin de facilitar el ajuste de las monturas de dobles varillas Minima a la fisonomía del usuario, es suficiente seguir algunas indicaciones según su necesidad.


#### INCLINACIÓN

Sujetar sobre la varilla, una a una hacia arriba o hacia abajo.



#### APERTURA

Sujetar sobre las dos varillas simultáneamente.

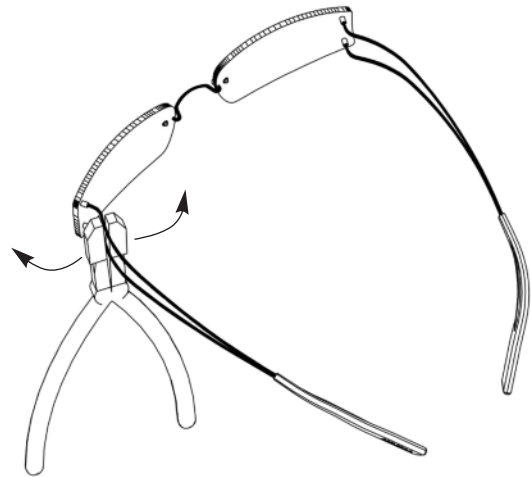

#### AJUSTE DEL TERMINAL

1- Retirar el terminal


2- Recortar las 2 varillas con la largura deseada




3- Redirigir la curvatura de cada varilla



4- Colocar el terminal manteniendo sujetas las 2 varillas con la pinza, hasta la zona de bloqueo

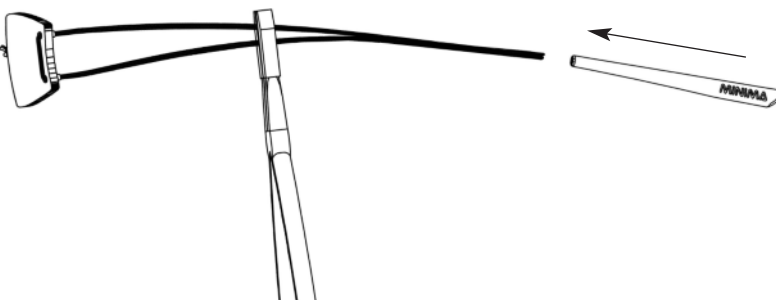


5- Mantener fuertemente el terminal y curvarlo apoyándose por la parte del terminal

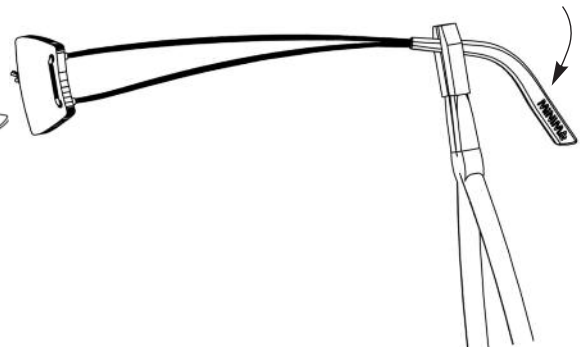


Enfile el terminal derecho correspondiente a la varilla derecha y viceversa.  
Truco : la inscripción "MINIMA" siempre queda en el lado exterior del terminal.

### D - DESMONTAJE DE VARILLAS


1- Deslizar el hilo entregado, entre el talón y la curvatura externa de la lente

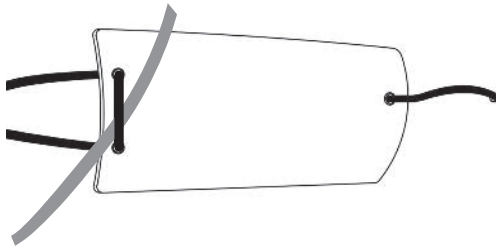


2- Para facilitar la extracción, colocar la mitad del hilo por debajo de una de las dos extremidades del talón, evitando la parte central

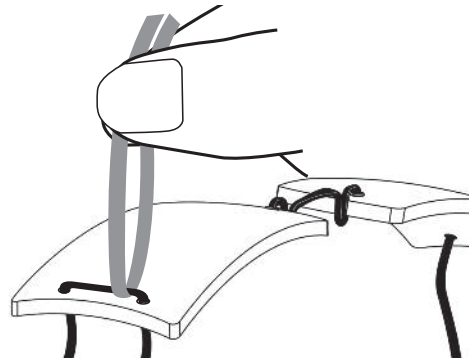


3- Introducir el hilo en el agujero del caucho entregado  
Colocar este calzo contra la cara convexa de la lente

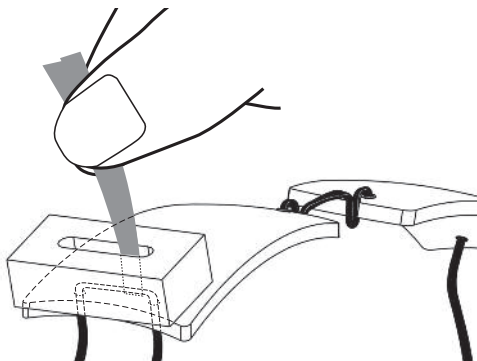

4- Insertar los dos extremos del hilo en la pinza

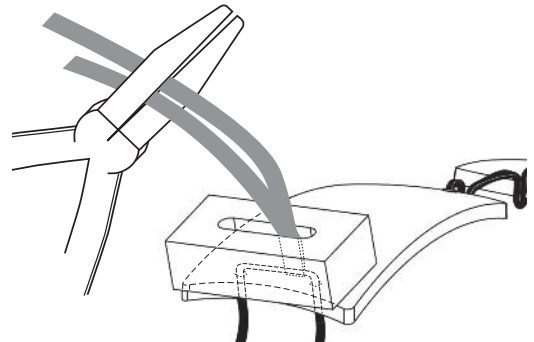

5- Enrollar el hilo rodeando la pinza hasta la extracción del primer lado

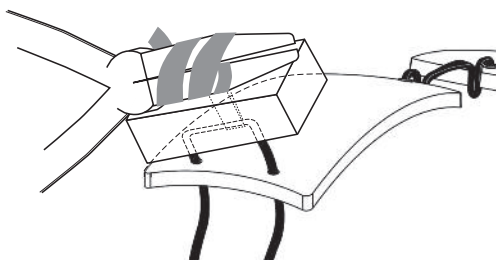

6- Para facilitar la extracción total de la varilla, repetir la operación sobre el otro extremo del talón

