


A - MONTAJE

MARCAJES

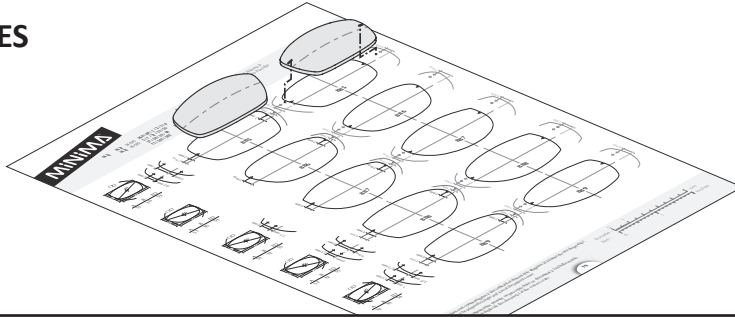


Colocar las muescas con la ayuda de la hoja de formas.
Según la utilización de plaquetas o puente W desnudo, dirigirse a las indicaciones específicas de las hojas de formas.

PERFORACIONES / MUESCAS

La perforación se hace utilizando las medidas, al lado, según el material disponible.

Utilizando la guía de perforación Minima-Zero :

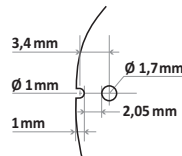


Con la guía de perforación Minima-Zero :


1- Colocar celo entre la guía y la lente



2- Colocar la guía paralela al eje de la lente

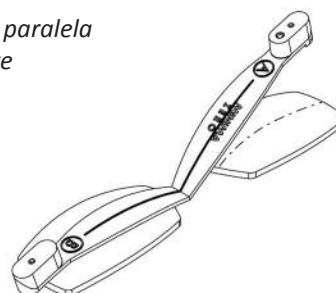

3- Posicionar la guía lado A contra el borde de la lente, después perforar
4- Perforar (medidas arriba)

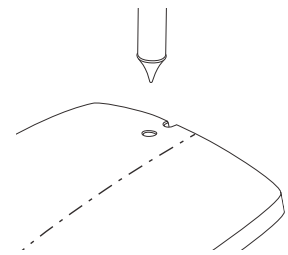


5- Posicionar la guía lado B, saliente en el agujero de Ø 1,7 mm y perforar de nuevo a Ø 1 mm

6- Acabado : desbarbar cada lado del agujero y de la muesca


MONTAJE DEL PUENTE

Insertar la polimida en el agujero de la lente, lado cóncavo, después cortar.

Utilizar o proteger lente Minima-Zero

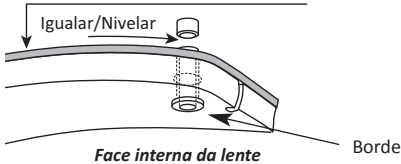


Para insertar el puente, ayúdense de la pinza Minima-Zero entregada.

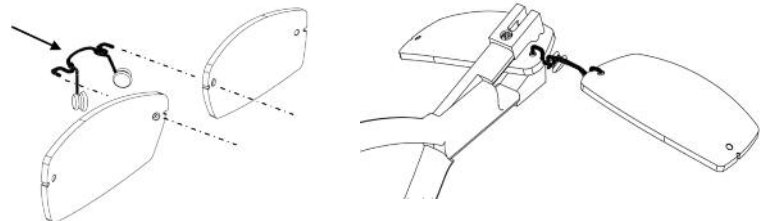


Mantener el borde de la poliamida contra la cara cóncava de la lente.


MONTAJE DE VARILLAS

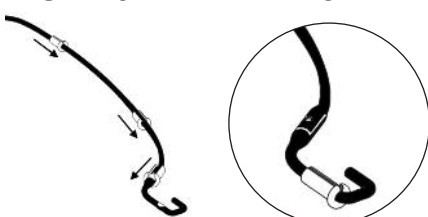


Deslizar la poliamida a lo largo de la varilla, colocando la abertura hacia arriba.

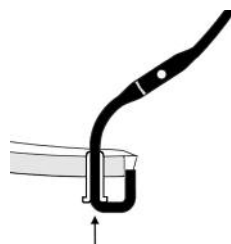

Insertar la vuelta de la varilla en la muesca de la lente.

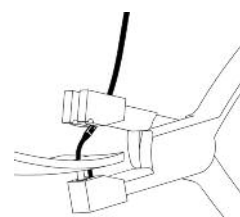

Posicionar la pinza de montaje de apoyo sobre la varilla.

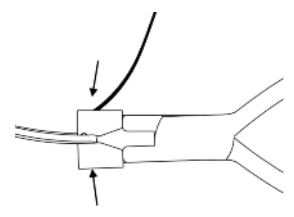


Apretar con la ayuda de la pinza.

B - AJUSTE / DESMONTAJE


AJUSTE

Inclinación :

Posición de la pinza :

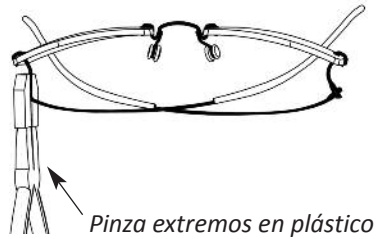


Acción a efectuar varillas cerradas :

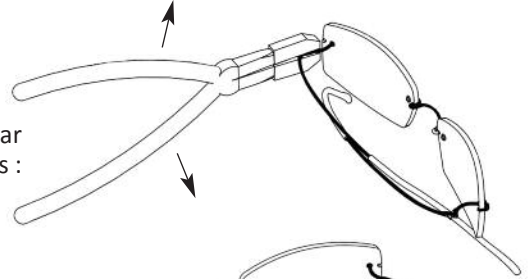


Apertura :

Posición de la pinza utilizando el elemento bisagra :

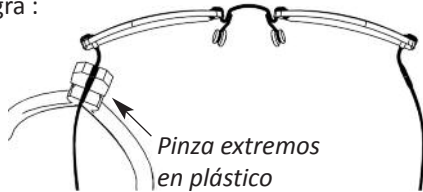


Acción a efectuar :

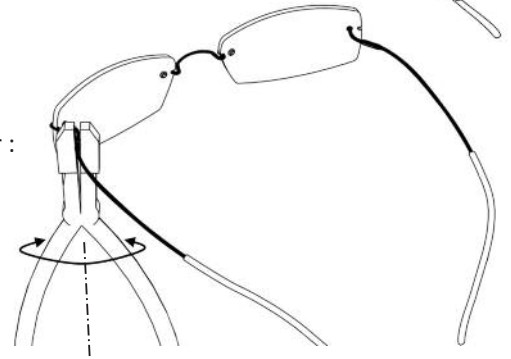


Paralelismo :

Posición de la pinza :

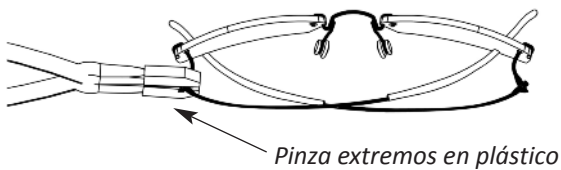


Acción a efectuar :

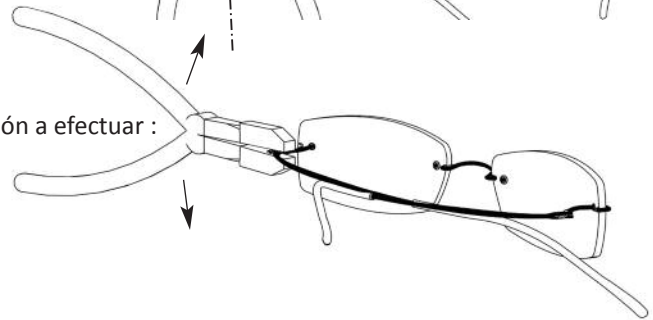


EXTRACCION DE VARILLAS


Utilizar el punzón entregado.

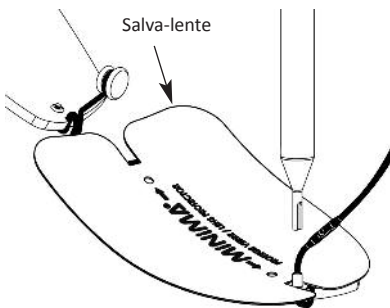

Empujar la poliamida con el útil.



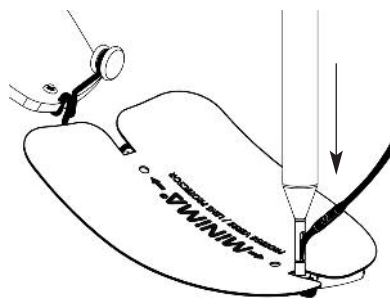


Liberar la varilla de la perforación de la lente.

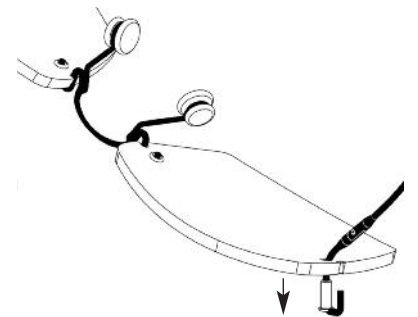

EXTRACCION DEL PUENTE

Deslizar el hilo entregado, entre el hilo de titanio y la curvatura de la lente.

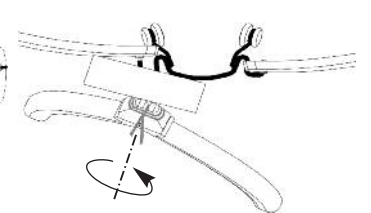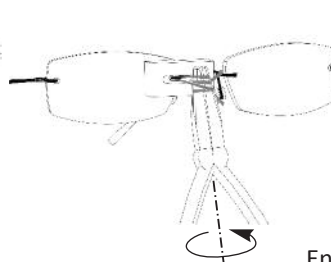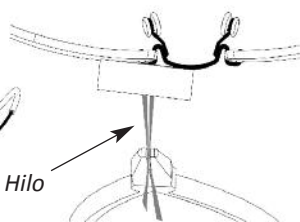

Introducir el hilo en el agujero del calzo de caucho entregado. Colocar este calzo contra la cara convexa de la lente.

Enrollar el hilo envolviendo la pinza hasta la extracción.