


A - MONTAJE

MARCAJES

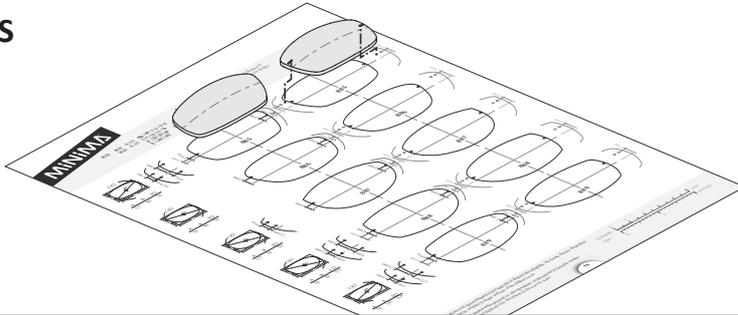


Colocar las muescas con la ayuda de las hojas de formas. Según la utilización de plaquetas o puente W desnudo, dirigirse a las indicaciones específicas de las hojas de formas.

PERFORACION / MUESCA

La perforación se hace utilizando las medidas, según el material disponible.

Utilizando la guía de perforación Minima-Zero :

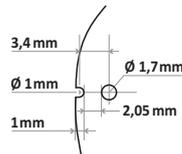


Con la guía de perforación Minima-Zero :

1- Colocar celo entre la guía y la lente




2- Colocar la guía paralela al eje de la lente

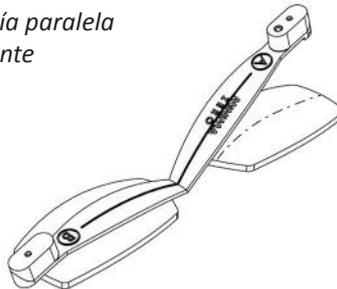

3- Posicionar la guía lado A contra el borde de la lente, después perforar
4- Perforar (medidas arriba)

5- Posicionar la guía lado B, saliente en el agujero de $\varnothing 1,7$ mm y perforar de nuevo a $\varnothing 1$ mm

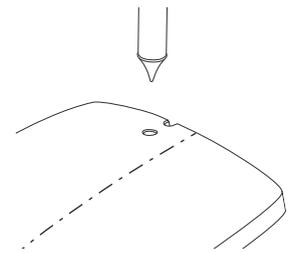




6- Acabado : desbarbar cada lado del agujero y de la muesca

MONTAJE DEL PUENTE

Insertar la poliamida en el agujero de la lente, lado cóncavo, después cortar.

Para insertar el puente, ayúdense de la pinza Minima-Zero entregada.


Montaje del puente adaptable.

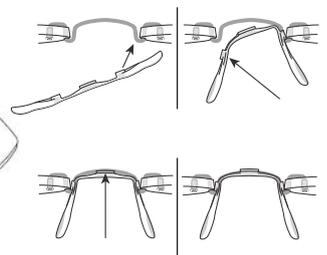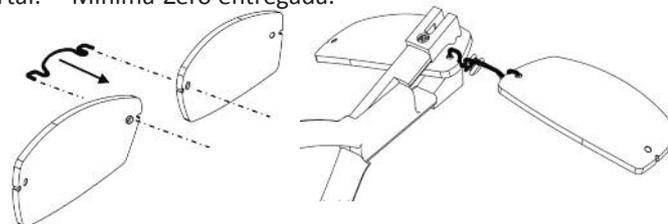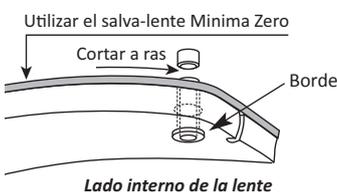

Mantener el borde de la poliamida contra la cara cóncava de la lente.

MONTAJE DE VARILLAS

Insertar las varillas provistas de su poliamida.

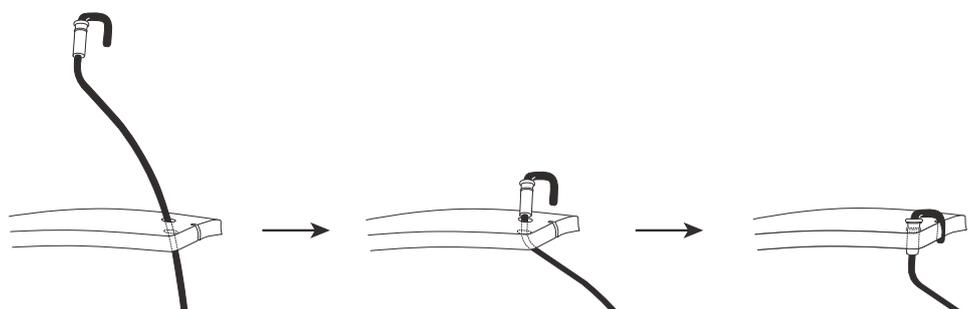


B - DESMONTAJE

REEMPLAZO DE LAS POLIAMIDAS

Insertar la poliamida, el borde delante.




Ayudarse de la guía de perforación para la inserción completa de la poliamida.

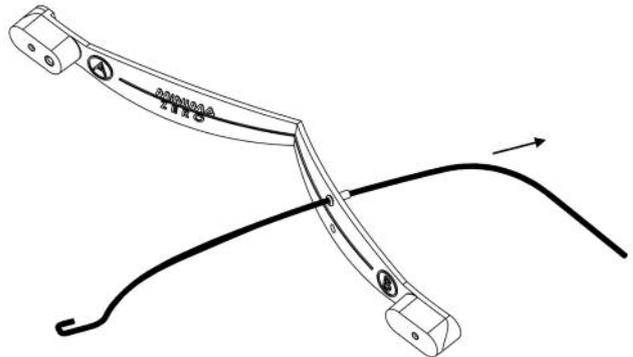


EXTRACCIÓN DEL PUENTE Y VARILLAS

Deslizar el hilo entregado, entre el hilo de titanio y la curvatura externa de la lente.

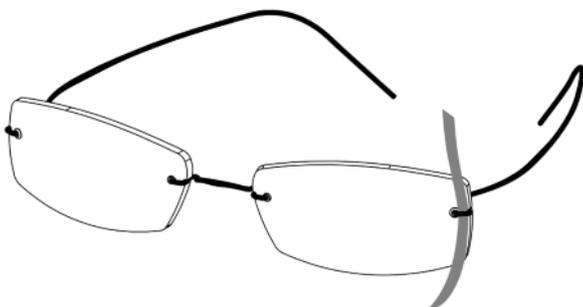

Introducir el hilo en el agujero del calzo de caucho entregado. Colocar este calzo contra la cara convexa de la lente.

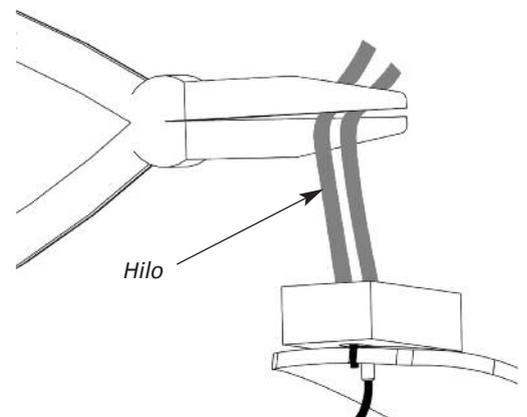

Enrollar el hilo volteando la pinza hasta la extracción.

